

Nosko Aspirator do nosa

Nasza cena: 52,25 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	Salveo Poland Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Aspirator do nosa Nosko jest wyrobem medycznym, który można podłączyć do dowolnego domowego odkurzacza. Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa wydzielinę z nosa niemowląt i dzieci, które nie potrafią samodzielnie wydmuchać nosa. Drożny nosek pozwala dzieciom na prawidłowe oddychanie, bezpieczne karmienie i spokojny sen, co w pierwszych latach życia jest najważniejsze.

- delikatny dla śluzówki nosa
- prosty w użyciu, łatwy do rozłożenia na części i czyszczenia (dołączona szczoteczka)
- sprawdzona jakość, dostępny tylko w aptekach, wraz z fachową poradą

W skład zestawu Nosko wchodzi:

- dwie końcówki do oczyszczania nosa:
- dla dzieci od 0 – 6 miesięcy
- dla dzieci powyżej 6 miesięcy
- szczoteczkę do czyszczenia końcówki do nosa

Sposób użycia:

Zalecamy, by przed użyciem aspiratora dobrze wyplukać nos dziecka roztworem izotonicznym w sprayu. Po zatkanie jednej dziurki nosa dziecka i włączeniu odkurzacza, należy do drugiej dziurki włożyć węższą końcówkę aspiratora. Nosi set usuwa wydzielinę działając stałym i niezmiennym ciśnieniem, niezależnie od nastawionej siły ssącej, dlatego jest delikatny dla śluzówki nosa. Po usunięciu wydzieliny z nosa, najpierw należy wyłączyć odkuracz, a następnie odłączyć aspirator od odkurzacza. Po użyciu, aspirator należy przepłukać strumieniem gorącej wody, a końcówkę wyczyścić za pomocą dołączonej szczoteczki.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.