

Nosonek hipertoniczny spray do nosa, 120 ml



Nasza cena: 26,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120 ml
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Nosonek hipertoniczny spray do nosa, 120 ml to wyrób medyczny w postaci łagodnego hipertonicznego roztworu wody morskiej do nosa. Produkt może być stosowany u dzieci od 3. roku życia. Roztwór pomaga udrożnić nos i tym samym przynieść ulgę w stanach chorobowych, które charakteryzują się zwiększoną ilością wydzieliny. Woda użyta w preparacie pochodzi z kontrolowanego obszaru zatoki Cancale w Bretanii, która znana jest ze swej czystości i jakości.

Zawartość opakowania: Spray 120 ml z aplikatorem do nosa.

Dla dorosłych oraz dzieci od 3. roku życia.

SKŁAD

Woda morska, woda oczyszczona,

POSTAĆ PRODUKTU

Spray do nosa

DZIAŁANIE

Hipertoniczny spray do nosa, dzięki swojemu działaniu osmotycznemu usuwa nadmiar wydzieliny z komórek błon śluzowych. Przez co umożliwia mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie górnych dróg oddechowych oraz pozwala zmniejszyć obrzęk błon śluzowych.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyrób wskazany w celu eliminacji zwiększonej ilości wydzieliny z nosa w przypadku:

- infekcji błon jamy nosowo-gardłowej,
- kataru,

- infekcji zatok przynosowych,
- chrapania spowodowanego suchością błon śluzowych.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Dorośli:

1. Włożyć delikatnie końcówkę aplikatora do otworu nosowego.
2. Nacisnąć dozownik.
3. Odczekać aż roztwór rozrzedzi wydzielinę, następnie wydmuchać nos.
4. Czynność powtórzyć przy drugim otworze nosowym.
5. Po zakończonej aplikacji, należy przepłukać końcówkę aplikatora wodą i osuszyć ją.

Dzieci:

1. Ułożyć dziecko w pozycji leżącej, przechylając jego głowę nieco w bok, by ułatwić aplikację roztworu do otworu nosowego.
2. Rozpylić roztwór poprzez kilkukrotne naciśnięcie dozownika.
3. Ułożyć dziecko w pozycji siedzącej i zebrać wypływającą z nosa wydzielinę.
4. Czynność powtórzyć przy drugim otworze nosowym.
5. Delikatnie wytrzeć dziecku chusteczką nos, uważając by nie włożyć jej zbyt głęboko do otworu nosowego.
6. Po zakończonej aplikacji, należy przepłukać końcówkę aplikatora wodą i osuszyć ją.

Dorośli i dzieci od 3. roku życia:

Stosować 2-3 dawki do każdego otworu nosa, od 2 do 3 razy na dobę.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki zamieszczonej w opakowaniu.

W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.

Z powodów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, preparat powinien być stosowany przez jedną osobę.

Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 40°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.