

# Opaska elastyczna tkana CEPHAMED 5m\*10cm z zapinką



Nasza cena: 3,37 zł

## Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

WYRÓB MEDYCZNY

### Opaska elastyczna tkana z zapinką:

- Rozciągliwa.
- Mięka.
- Oddychająca.
- Można prać.

### Opaskę elastyczną stosować w celu:

- podtrzymania opatrunku
- wsparcia krążenia żylnego
- odciążenia i stabilizacji okolic stawowych.

### Przepis konserwacji:

W przypadku zabrudzenia prać ręcznie w temp. 40oC z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować. Nie chlorować. Suszyć w stanie luźnym. Wyrób wielokrotnego użytku. Po utracie elastyczności wyrób zutylizować.

## Środki ostrożności:

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W razie wystąpienia uczucia silnego ucisku należy zmniejszyć napięcie opaski. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

## Producent:

Paso-Trading sp. z o.o.

ul. Lutomińska 48

95-200 Pabianice

## Wyprodukowano dla:

Admira Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91/93

90-613 Łódź

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**