

Opatrunek Fibracol Plus 10,2cm x 11,1cm x 1

Nasza cena: 27,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	Johnson & Johnson Medical Wielka Brytania [Gb]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	EMPLASTRI COLLAGENOSA

Opis produktu

Opis

Fibracol Plus to nowoczesny opatrunek złożony z kolagenu i alginianu wapnia. Kolagen jest głównym składnikiem skóry i tkanki łącznej. Alginian jest naturalnym polisacharydem otrzymywanym z alg morskich. Połączenie kolagenowo - alginianowe stwarza wspiane biologiczne współdziałanie kolagenu z jego właściwościami tworzenia żelu i alginianu powodując gojenie wilgotnych ran. Unikalne połączenie naturalnych biopolimerów łączące strukturalną wytrzymałość kolagenu z własnościami żelującymi alginianu tworzy jałowy, chłonny, miękki i wygodny opatrunek miejscowy. W obecności wysięku z rany, opatrunek **Fibracol Plus** utrzymuje fizjologiczne wilgotne mikro środowisko na powierzchni rany, stymuluje rozwój tkanki ziarninującej oraz przyspiesza proces gojenia ran. **Fibracol Plus** jest opatrunkiem wszechstronnym i podstawowym; jego rozmiary można dostosować do rozmiaru rany, ogranicza wysięk, w przypadku ran głębokich należy aplikować opatrunek wielowarstwowo. Może być nakładany dowolną stroną. Jest wolny od włókien, miękki i wygodny.

Zastosowanie:

Stosować przy uszkodzeniu pełnej i niepełnej grubości skóry, odleżynach, owrzodzeniu żylnym, owrzodzeniu o mieszanej etiologii naczyniowej, owrzodzeniu cukrzycowym, oparzeniu II stopnia, miejsca biorsche po przeszczepach oraz innekrwawiące rany powierzchniowe, otarcia, przewlekłe rany pourazowe, rozejścia się ran chirurgicznych.

Sposób użycia:

Oczyścić i przemyć ranę roztworem soli fizjologicznej. Usunąć nadmiar płynu z okolic rany. Na ranę z dużym wysiękiem nałożyć opatrunek bezpośrednio. Rany z minimalnym wysiękiem należy zwilżyć, co zapoczątkuje proces żelowania opatrunku. W głębokie rany należy włożyć opatrunek luźno. Powinien on być przycięty wyjąłowionymi nożyczkami. Opatrunek **Fibracol Plus** może być przykryty zewnętrznym opatrunkiem, nieokluzyjnym, mocowanym do skóry przy pomocy przylepca, nie powodującego podrażnień lub opatrunkiem półokluzyjnym. Nałożyć powtórnie opatrunek **Fibracol Plus**, gdy opatrunek zewnętrzny osiągnął maksimum swych właściwości absorpcyjnych lub gdy względy praktyczne wymagają jego zmiany. Rany z dużym wysiękiem wymagają codziennej lub dwukrotnej w ciągu dnia zmiany opatrunku. Rany z towarzyszącą niewielką ilością wysięku wymagają rzadszej zmiany opatrunku (co 2 do 4 dni lub wg zaleceń personelu medycznego). Przed aplikacją kolejnego opatrunku, ranę należy zwilżyć roztworem soli fizjologicznej,

tak jak przed zastosowaniem opatrunku. Powtórnie nakładać opatrunek Fibracol Plus w sposób opisany powyżej.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.