

# Opatrunek Suprasorb P Jałowy 10cm x 10cm x 1 Nieprzylepny

Nasza cena: 11,45 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	LOHMANN AND RAUSCHER GMBH CO KG. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	EMPLASTRI POLYURETHANUM SPUMATUM

## Opis produktu

### Opis

#### Poliuretanowy opatrunek piankowy Suprasorb P rozmiar 10 cm x 10 cm:

- łatwy w zakładaniu
- chłonący wydzielinę opatrunek
- nie uszkadza tkanki podczas zdejmowania
- zapewnia optymalne środowisko rany

Opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P, bez kleju, to opatrunek składający się z dwóch warstw poliuretanowych: nośnej i piankowej. Każdy opatrunek jest pojedynczo pakowany, gotowy do użycia i wysterylizowany promieniami Gamma. Opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P bez kleju, przeznaczony jest do jednorazowego użytku i nie może być ponownie sterylizowany.

Opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P, bez kleju został wykonany w taki sposób, że dzięki swoim właściwościom chłonnym zapewnia optymalne warunki przy opatrywaniu ran powierzchniowych, średnio sączących. Podczas wchłaniania wydzieliny opatrunek lekko się rozciąga i dzięki temu optymalnie pokrywa ranę.

Pod bezklejowym opatrunkiem z pianki poliuretanowej Suprasorb P tworzy się w ranie optymalne wilgotne środowisko, co zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany.

Zmiana opatrunku nie powoduje uszkodzenia tkanki. Opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P jest niezwykle elastyczny i dlatego nadaje się do stosowania także przy trudno dostępnych częściach ciała.

#### Zakładanie opatrunku Syprasorb P

1. Przygotowanie rany: Rana musi być starannie oczyszczona w sposób standardowy i następnie osuszona kompresikami. Otoczenie rany musi być suche, odtłuszczone i czyste
2. Zakładanie opatrunku: Wielkość opatrunku zależy od wielkości rany. Otworzyć sterylne opakowanie i wyjąć opatrunek. Założyć

opatrunek na ranę i zamocować odpowiednim opatrunkiem wtórnym.

3. Zmiany opatrunku: Okresy w jakich powinien być zmieniany bezklejowy opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu rany. Opatrunek musi zostać zmieniony, jeżeli wydzielina już tak wypełnia piankę, że zaczyna ona wystawać poza brzegi rany.

Opatrunek z pianki poliuretanowej Suprasorb P może pozostać na oczyszczonej ranie do 5-7 dni

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**