

## Opti-Free Express płyn do soczewek, 355ml



Nasza cena: 28,76 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	355 ml
Producent	ALCON POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### Opti-Free Express płyn do soczewek, 355ml

Opti-Free Express to płyn do pielęgnacji, dezynfekcji, czyszczenia, spłukiwania, nawilżania i przechowywania miękkich soczewek kontaktowych. Płyn zapewnia długotrwały komfort noszenia soczewek, również dla oczu wrażliwych. Nawilża soczewki łagodząc drobne podrażnienia i dyskomfort mogący pojawić się w trakcie ich noszenia.

#### Sposób użycia

Aby zdezynfekować soczewkę wystarczy spuścić po 3 krople na każdą jej stronę i pocierać powierzchnię przez 20 sekund. Następnie należy porządnie je spłukać. Soczewki przechowujemy w roztworze przez co najmniej 4 godziny dla pełnej dezynfekcji. W przypadku stosowania do soczewek tradycyjnych potrzebny dodatkowy roztwór do czyszczenia enzymatycznego.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**