

Pani Teresa Basis Podkolanówki II Czubki otwarte rozmiar XXL Czarne Długie

Nasza cena: 57,24 zł



Opis słownikowy

Producent	Pani Teresa Września
Rejestracja	Artykuły medyczne

Opis produktu

Opis

Pani Teresa Basis Podkolanówki II czubki otwarte rozmiar XXL czarne długie wskazania:

- Żylaki z towarzyszącymi obrzękami,
- zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich,
- po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył,
- przed i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył,
- obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach,
- obrzęki chłonne,
- obrzęki nóg i powiększające się żylaki u kobiet ciężarnych,
- noga obrzęknięta, bolesna.

Sposób użycia:

- Podkolanówkę nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
- Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
- Nałożyć podkolanówkę do kolan. Dokładnie rozprowadzić na łydce do pełnej długości zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania.
- Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia

Skład:

- Poliamid 78%
- Lycra 22%