

Pani Teresa Opaska Nadgarstek rozmiar M 19-22 cm, 1 sztuka



Nasza cena: 20,31 zł

Opis słownikowy

Producent	PANI TERESA WRZEŚNIA POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Pani Teresa Opaska Nadgarstek rozmiar M 19-22 cm, 1 sztuka

Rozmiar M - obwód ręki w nadgarstku 19 – 22 cm

Opaska elastyczna na nadgarstek to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Wskazania

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo – reumatycznych stawu nadgarstkowego
- wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu – działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji
- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki
- zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka

Sposób zakładania

Opaskę naciągnąć na wysokość stawu nadgarstka tak, aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

Przepis prania

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.