

Pani Teresa Pas Uniwersalny brzuszny rozmiar M "22"



Nasza cena: 58,81 zł

Opis słownikowy

Producent	PANI TERESA WRZEŚNIA POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- w przebiegu chorób zwyrodnieniowo – zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle
- pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej
- ma działanie ocieplające

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

Szerokość pasa 22 cm.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.