


Pani Teresa podkolanówki "1"czubki zamknięte i czarne długie

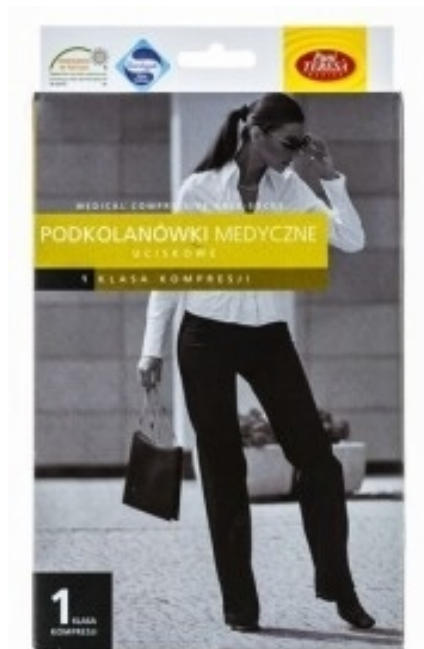

Nasza cena: 30,99 zł

Opis słownikowy

Producent	Pani Teresa Września
Rejestracja	Artykuły medyczne

Opis produktu

Opis

Podkolanówki z czubkiem zamkniętym.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

Dawkowanie - Pani Teresa podkolanówki "1"czubki zamknięte i czarne długie

Podkolanówkę nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Nałożyć podkolanówkę do kolan. Dokładnie rozprowadzić na łydce do pełnej długości zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.

Składniki - Pani Teresa podkolanówki "1"czubki zamknięte i czarne długie

Poliamid 79%
Lycra 21%

Działania

Pobudzają krążenie krwi w nogach, zmniejszają obrzęk nóg.

Wskazania - Pani Teresa podkolanówki "1"czubki zamknięte i czarne długie

-żylaki z towarzyszącymi obrzękami,

- zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich,
- po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył,
- przed i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył,
- obrzęki po słuczeniach, złamaniach i zwichnięciach,
- obrzęki chłonne,
- obrzęki nóg i powiększające się żyłaki u kobiet ciężarnych,
- noga obrzęknięta, bolesna.

Przeciwwskazania - Pani Teresa podkolanówki "1" czubki zamknięte i czarne długie

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa.