

Pani Teresa pończochy 2 czubki zamknięte L czarne długie

Nasza cena: 72,53 zł

Opis słownikowy

Producent	Pani Teresa Września
Rejestracja	Artykuły medyczne

Opis produktu

Opis

Pani Teresa pończochy 2 czubki zamknięte L czarne długie to medyczne uciskowe pończochy 2 klasy kompresji są wyrobem kompresyjnym - przeciwżylakowym. Stosując pończochy uciskowe o zmiennym stopniu kompresji, ograniczamy obrzęk kończyny dolnej i poprawiamy krążenie krwi. W efekcie następuje zmniejszenie widoczności żyłaków.

Wskazania:

- żyłaki z towarzyszącymi obrzękami
- zakrzepy żył powierzchownych i głębokich
- po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
- obrzęki chłonne
- noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”
- po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żyłakowych
- słoniowacizna nóg i goleni
- obrzęki nóg i powiększające się żyłaki u kobiet ciężarnych

Sposób użycia:

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

Uwaga:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.