

# Pani Teresa pończochy II czubki zamknięte S beżowe długie

Nasza cena: 69,61 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	* 1
Producent	Pani Teresa Września
Rejestracja	Artykuły medyczne

## Opis produktu

### Opis

**Pani Teresa pończochy 2 czubki zamknięte S beżowe długie** to medyczne uciskowe pończochy 2 klasy kompresji są wyrobem kompresyjnym - przeciwżylakowym. Stosując pończochy uciskowe o zmiennym stopniu kompresji, ograniczamy obrzęk kończyny dolnej i poprawiamy krążenie krwi. W efekcie następuje zmniejszenie widoczności żylaków.

#### **Wskazania:**

- żylaki z towarzyszącymi obrzękami
- zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich
- po przebyłym zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
- obrzęki chłonne
- noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”
- po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żylakowych
- słoniowacizna nóg i goleni
- obrzęki nóg i powiększające się żylaki u kobiet ciężarnych

#### **Sposób użycia:**

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

#### **Uwaga:**

**Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.**