

# Pani Teresa Pończochy kropki Czubki otwarte M Czarne Długie

Nasza cena: 43,78 zł

## Opis słownikowy

Producent	Pani Teresa Września
Rejestracja	Artykuły medyczne

## Opis produktu

### Opis

**Pani Teresa kropki czubki otwarte M czarne długie** to medyczne uciskowe pończochy, które są wyrobem kompresyjnym - przeciwżylakowym. Stosując pończochy uciskowe o zmiennym stopniu kompresji, ograniczamy obrzęk kończyny dolnej i poprawiamy krążenie krwi. W efekcie następuje zmniejszenie widoczności żyłaków.

#### Wskazania:

- żyłaki z towarzyszącymi obrzękami
- zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich
- po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
- obrzęki chłonne
- noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”
- po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żyłakowych
- słoniowacizna nóg i goleni
- obrzęki nóg i powiększające się żyłaki u kobiet ciężarnych

#### Sposób użycia:

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

#### Uwaga:

**Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.**