

Pani Teresa Temblak siatkowy rozmiar L

Nasza cena: 43,45 zł

Opis słownikowy

Producent	PANI TERESA WRZEŚNIA POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Wskazania/Zastosowanie:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Tabela rozmiarów:

Rozmiar - Obwód klatki piersiowej [cm]:

XS < 60
S 60 – 75
M 76 – 91
L 92 – 107
XL > 107

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.