

# Paski Keto-Diastix, 50 sztuk

Nasza cena: 5,47 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Producent	Bayer Diagnostics Manufacturing Ltd. Wielka Brytania [Gb]
Rejestracja	Lek na receptę

## Opis produktu

### Opis

## Paski Keto-Diastix, 50 sztuk

**Testy paskowe Keto-Diastix** służą do samodzielnego badania stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu.

## Właściwości

Oznaczanie stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu pomaga pacjentom cierpiącym na cukrzycę w rozpoznawaniu i dalszej diagnostyce diabetologicznej.

## Sposób użycia

- Należy pobrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika i przeprowadzić badanie możliwie jak najszybciej lub ewentualnie włożyć test paskowy pod strumień świeżego moczu.
- Po 15 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość ciał ketonowych porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce.
- Po 30 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość glukozy porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.