

# Pasocare Med Paski jałowe do zamykania ran, 8 sztuk



Nasza cena: 6,54 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Producent	PASO PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Pasocare Med Paski jałowe do zamykania ran, 8 sztuk

Wyrób medyczny

Włókninowe paski samoprzylepne służą do zbliżania do siebie krawędzi uszkodzonej skóry, dzięki czemu zapobiegają otwieraniu się ran i wspierają naturalny proces gojenia.

### Właściwości

- Hipoalergiczne, nie powodują uczuleń,
- Jałowe,
- Samoprzylepne,
- Służą do zbliżania krawędzi ran do siebie oraz do zapobiegania otwieraniu się ran podczas ich naturalnego procesu gojenia,
- Wykonane z miękkiej włókniny, delikatne dla skóry, oddychające.

### Zawartość opakowania

8 plastrów, zapakowanych w 2 listki:

- 5 sztuk w rozmiarze 3 x 75 (mm x mm)
- 3 sztuki w rozmiarze 6,4 x 80 (mm x mm)

Sposób użycia

- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę, a następnie delikatnie ją osuszyć.
- Otworzyć listki z plastrami w danym rozmiarze. Zagnij listek wzdłuż perforacji i pociągnij w celu odklejenia pasków.
- Zaaplikuj plaster zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry, uważając przy tym, aby zbyt mocno jej nie naprężyć.
- Jeśli to konieczne zastosuj kilka pasków w odległości nieprzekraczającej 1 cm od siebie.

### Środki ostrożności

Nie stosuj, jeśli opakowanie bezpośrednio wyrobu jest uszkodzone,

Po otwarciu opakowania bezpośrednio użyj plastry niezwłocznie,

Wyrób jednorazowego użycia, nie stosuj ponownie,

W przypadku zakażeń lub stanów zapalnych skóry, przed zastosowaniem wyrobu skonsultuj się z lekarzem,

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**