

Pasocare Plastry hydrokoloidowe na pęcherze mix, 6 sztuk



Nasza cena: 13,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	PASO TRADING SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Pasocare Plastry hydrokoloidowe na pęcherze mix, 6 sztuk

Ochronne plastry na pęcherze

Właściwości

- Zawierają hydrokoloid, który działa jak nowa skóra,
- Za sprawą amortyzacji i małego tarcia przynoszą ulgę w bólu,
- Plastry absorbują wydzielinę w przypadku otwartych pęcherzy oraz tworzą optymalne środowisko dla gojenia się ran,
- Z łatwością dopasowują się do kształtu stopy oraz chronią pęcherz przed zabrudzeniem i wilgocią.
- Hydrokoloid działa jak nowa skóra, która dzięki amortyzacji ucisku i minimalizacji tarcia przynosi ulgę w bólu. Plaster absorbuje wydzielinę w przypadku otwartych pęcherze oraz tworzy optymalne środowisko do gojenia się rany.

Sposób użycia

- Usunąć papier ze strony przylepnej plastra.
- Naklej plaster na oczyszczoną i osuszoną skórę, tak aby hydrokoloid zakrywał pęcherz.
- Usuń papier z wierzchniej strony plastra.
- Pozostaw plaster na skórze nawet przez kilka dni, do momentu, aż sam zacznie się odklejać. Aby uniknąć bólu podczas zdejmowania plastra, najpierw odwiń jego krawędzie (folię), a następnie zdejmij warstwę hydrokoloidu. Jeśli pęcherz pęknął zastosuj łagodny środek antyseptyczny.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

