

Pieluchomajtki Dry Kids XL+ (11-25Kg), 30 sztuk



Nasza cena: 43,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Producent	Sca Higiene Products Wielka Brytania
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Pieluchomajtki Dry Kids XL+ (11-25Kg), 30 sztuk

Dry Kids do pieluchomajtki w rozmiarze XL dla dzieci z problemem nietrzymania moczu w stopniu średnim lub ciężkim, ważących 11-25 kg.

Właściwości

Wyrób szybko pochłania wilgoć zapewniając suchość i komfort noszenia. Specjalne barierki zapobiegają przeciekaniu, a elastyczne przylepcorzepty umożliwiają dokładne zamocowanie pieluchy. Przewiewny materiał pozwala skórze swobodnie oddychać, dzięki czemu ryzyko wystąpienia podrażnień jest zminimalizowane.

Sposób użycia

1. Ułóż dziecko na boku, wsuń pieluchę pomiędzy nogi
2. Wygładź powierzchnię
3. W pierwszej kolejności przymocuj dolne przylepcorzepty, kierując je lekko ku górze. Następnie przymocuj górne przylepcorzepty, kierując je lekko ku dołowi.
4. Skontroluj ułożenie pieluchomajtek i komfort dziecka. Dociśnij lekko i wygładź przylepcorzepty.

Ważne

Produkt jednorazowego użytku, nie wyrzucać do toalety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB
Box 200
SE-101 23 Stockholm, Szwecja

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.