

Pipi Nitolic przeciw wszawicy zestaw

Nasza cena: 44,86 zł



Opis słownikowy

Producent	ICB PHARMA SP. J. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Przeznaczony do kompleksowego leczenia wszawicy wywołanej przez wszy głowowe. Po naniesieniu preparatu na głowę i włosy obserwuje się szybką i równomierną penetrację preparatu, który szczelnie pokrywa pasożyty (o-effect technology). Odcina dostęp powietrza do aparatu oddechowego i w ten sposób szybko eliminuje wszy. Preparat wykazuje też wysoką skuteczność likwidacji gniid: preparat osusza gniidy oraz odcina dostęp powietrza do ich układu oddechowego, co powoduje radykalne zatrzymanie rozwoju zarodkowego pasożytów. Mechaniczna blokada aparatu oddechowego, na którym opiera się działanie wyrobu medycznego Pipi Nitolic, wyklucza wykształcenie odporności pasożytów na preparat.

Preparat jest ponadto bezpieczny w stosowaniu, ponieważ nie zawiera środków owadobójczych (pestycydów), które mogą być szkodliwe dla ludzi.

Zawartość opakowania:

1. Pipi Nitolic - spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
2. Nitolic nit remover 20 ml - emulsja rozpuszczająca cementowe spoiwo, ułatwia usuwanie martwych gniid z włosów.
3. Nitolic Wash 20 ml – dodatek do prania przeznaczony do usuwania wszy głowowej oraz gniid a także wszy odzieżowej z tkanin, z którymi osoba zarażona miała kontakt, np.: ubrania bielizna pościel, koce narzuty itp.
4. Grzebień Nitolic – gesty grzebień służący do wyszukiwania owadów w celach diagnostycznych oraz usuwania martwych wszy i gniid po wykonanym zabiegu.
5. Czepek Nitolic
6. Lista kontaktów
7. Książeczka „Problem z głową”, dzięki której można umilić dziecku czas pod czas stosowania Pipi Nitolic oraz wyjaśnić mu, że problem wszy nie jest tak straszny, jak się może wydawać.

Wskazania:

Wszawica.

Sposób użycia:

Nanieść odpowiednią ilość preparatu na włosy i skórę głowy, pozostawić na dłuższy czas, a następnie usunąć martwe wszy za pomocą gęstego grzebienia. Bezwzględnie unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi ust i nosa.

Składniki:

Cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropylu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.