

Plaster Compeed na haluksy, 5 sztuk



Nasza cena: 25,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Technologia hydrokoloidu COMPEED to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, aby:

- Uśmierzać natychmiastowo ból i ucisk.
- Ochroniać halluksy przed kolejnymi otarciami.
- Zapobiegać pęcherzom oraz twardnieniu skóry.
- Pozostają na miejscu przez kilka dni.

W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Działania

Compeed działa jak druga skóra:

- przynosi natychmiastową ulgę w bólu i ucisku,
- chroni halluksy przed dalszym ocieraniem,
- chroni przed pojawianiem się pęcherzy.

Wskazania - Plaster Compeed na haluksy, 5 sztuk

Na istniejące halluksy, aby chronić przed powstawaniem pęcherzy i zrogowaceń.

Zawartość opakowania:

5 ochronnych plastrów na halluksy

Sposób użycia:

- Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta halluksem nie jest tłusta od kremu czy oliwki.
- Usuń górną warstwę papierową, następnie dolną warstwę starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
- Nałóż plaster mocno na halluks, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
- Pozostaw plaster na halluksie aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
- Zmień plaster COMPEED na nowy tak często jak jest to potrzebne.

Uwaga:

- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.
- Nie stosuj na zainfekowane rany.
- Nie stosuj ponownie tego samego plastra w celu uniknięcia infekcji.
- Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED
- Ewentualne ślady po plastrze mogą być łatwo usunięte za pomocą rozpuszczalnika (np. benzyny ekstrakcyjnej) przestrzegając przy tym instrukcji użycia producenta.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.