

Plaster Compeed Na Odciski między palcami x 6 2w1

Nasza cena: 15,76 zł

Opis słownikowy

Rejestracja

Artykuły medyczne

Opis produktu

Opis

Compeed Plastry na odciski- między palcami zawierają aktywny żel, który przynosi natychmiastową ulgę w bólu i pomaga usunąć odciski. Pozostają na miejscu ponad 24 godziny dostarczając optymalnej ochrony przed otarciami i uciskiem. Specjalny kształt zapewnia właściwe dopasowanie.

Opakowanie zawiera 10 plastrów.

Plastry na odciski dzięki technologii hydrokoloidowej pomagają utrzymać naturalną wilgotność skóry, aby:

- Chronić przed uciskiem
- Przynieść natychmiastową ulgę w bólu spowodowaną przez odciski
- Nawilżyć i zmiękczyć odcisk, pomagając go usunąć
- Posiadają wgłębienie zmniejszające ucisk

Jeden plaster utrzymuje się na miejscu przez ponad 24 godziny. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Sposób użycia:

1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.
2. Usuń górną warstwę papierową, potem dolną warstwę papierową starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
4. Pozostaw plaster na odcisku, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać.
5. Dla otrzymania lepszych rezultatów używaj Compeed aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona z odcisku.