

Plaster Compeed na odciski na palec, 10 sztuk



Nasza cena: 23,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

PLASTRY COMPEED na odciski na palcach.

Dawkowanie - Plaster Compeed na odciski na palec, 10 sztuk

Plaster nakładamy na umytą i osuszoną skórę. Plaster umieszczamy wbudowanym dyskiem na odcisku. Maksymalnie po 48 godzinach należy zdjąć plaster. Należy zanurzyć zmienione miejsce w ciepłej wodzie na pięć minut przed usunięciem zmiękczonej skóry. Należy powtarzać tę kurację, w zależności od potrzeb przez kolejne 14 dni.

Działania

- Natychmiastowa ulga w bólu i eliminacja ucisku
 - Specjalny kształt zapewniający optymalne dopasowanie
 - Zagłębienie zmniejszające ucisk.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.