

## Plaster Compeed, na odciski, nawilżające, 6 sztuk



Nasza cena: 25,56 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

Nawilżające plastry na odciski COMPEED zostały stworzone, aby pomagać w zapobieganiu odciskom dzięki zwiększonej ochronie i ciągłemu nawilżaniu. Plastry hydrokoloidowe COMPEED z unikalnym krążkiem zawierającym zmiękczające serum to:

- Długotrwałe i precyzyjne nawilżanie zrogowaciałych warstw naskórka.
- Ochrona przed otarciami i uciskiem.
- Uśmierzenie bólu powstałego w wyniku ucisku i zrogowaceń, które narastając tworzą odciski.
- Stworzone, aby pomagać w zatrzymaniu procesu powstawania odcisków zanim się pojawią.

#### Sposób użycia:

- Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.
- Usuń górną warstwę papierową, następnie dolną warstwę, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
- Nałóż plaster mocno na docelowe miejsce, tak aby krążek nawilżający był pośrodku, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
- Pozostaw plaster, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
- Dla najlepszych rezultatów używaj plastra COMPEED aż do czasu, kiedy skóra będzie zmiękczona i wyleczona. Używaj tak często jak to konieczne, aby zmiękczyć lub zapobiegać - narastaniu zrogowaciego naskórka, który tworzy odcisk.

#### Uwaga:

- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.
- Nie stosować na zainfekowane rany.
- Nie stosować ponownie tego samego plastra aby uniknąć infekcji.
- Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED

- Ewentualne ślady po plastrze mogą być łatwo usunięte za pomocą rozpuszczalnika (np. benzyny ekstrakcyjnej) przestrzegając przy tym instrukcji użycia producenta.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**