

Plaster Compeed na pęcherze dla aktywnych *5

Nasza cena: 25,57 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Plaster działa jak druga skóra, pomaga utrzymać naturalną wilgotność skóry, aby przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze, chronić przed otarciami, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

Wskazania:

COMPEED Plastry na pęcherze na piętach dla aktywnych to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania przy pierwszych oznakach ocierania, aby zapobiegać powstawaniu pęcherzy, na istniejące pęcherze, aby przynieść natychmiastową ulgę w bólu i przyspieszyć gojenie. Są polecane w szczególności osobom uprawiającym sport.

Stosowanie:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki. Usuń górną warstwę papierową, następnie dolną warstwę, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni). Aby usunąć plaster, nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij wzdłuż skóry.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.