

# Plaster Compeed na zrogowacenia na podeszwie żelowy, 6 sztuk



Nasza cena: 23,67 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Kiedy skóra jest poddawana ciągłemu naciskowi, reaguje tworzeniem grubej warstwy martwego naskórka zwanej zrogowacieniem. COMPEED działa jak druga skóra:

- przynosi natychmiastową ulgę w bólu i ucisku
- zapewnia optymalną amortyzację przed ocieraniem i narastaniem nacisku
- nawilża i zmiękcza zrogowacenia, aby delikatnie, ale skutecznie je usunąć.

## Dawkowanie - Plaster Compeed na zrogowacenia na podeszwie żelowy, 6 sztuk

Plaster nakładamy na umytą i osuszoną skórę. Plaster umieszczamy wbudowanym dyskiem na odcisku. Maksymalnie po 48 godzinach należy zdjąć plaster. Należy zanurzyć zmienione miejsce w ciepłej wodzie na pięć minut przed usunięciem zmiękczonej skóry. Należy powtarzać tę kurację, w zależności od potrzeb przez kolejne 14 dni.

## Uwagi

W przypadku cukrzycy przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**