

Plaster na odciski z kwasem salicylowym 6 sztuk

Nasza cena: 14,93 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	3M POLAND POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Plastry na odciski z kwasem salicylowym. Masa aktywna zawiera kwas salicylowy, mlekowy i lanoline, które nawilżają i zmiękczejają odcisk.

Wskazania:

Do stosowania miejscowo na odciski.

Dawkowanie:

Usuń folię ochronną. Nałóż plaster na czystą i suchą skórę, tak aby pierścień ochronny otaczał odcisk, przez co plaster chroni zmienione chorobowo miejsce przed uciskiem i otarciami, przynosząc ulgę. Stosuj do momentu, aż odcisk zostanie usunięty, maksymalnie 10-14 dni.

Składniki:

Kwas salicylowy, kwas mlekowy, lanolina, wosk pszczeły żółty, żywica świerkowa, kopolimer etylenu i octan winylu, kłaczce kosacca, terpentyna, balsam (olejek) kopaiwa, klej, włóknina, papier.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.