

Plaster na odciski z kwasem salicylowym Komfort, 4 sztuki



Nasza cena: 8,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*4
Producent	FA.LANGSTEINER POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	ACIDUM SALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Plaster na odciski z kwasem salicylowym Komfort, 4 sztuki

Wskazania i przeciwwskazania:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nakładać plastra na okolice odcisku, jeżeli skóra jest podrażniona lub występują stany zapalne. Nie stosować w przypadku uczulenia na kwas salicylowy i inne składniki produktu. Unikać stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersią. Zaprześcić stosowania i zdjąć plastry w przypadku mocnego podrażnienia i odczuwalnych dolegliwości (pieczenie, zaczerwienienie) lub nadwrażliwości na produkt. Osoby chore na cukrzycę – stosować po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie:

Na czystą i suchą stopę nałożyć plaster tak, aby substancja czynna przylegała do odcisku. Stosować plastry do momentu aż odcisk zostanie usunięty. Każdy plaster należy nałożyć na ok. 24 godziny. Po zakończeniu kuracji można usunąć środkową część odcisku stosując ciepłą kąpiel stóp z użyciem soli i mydła. Jeżeli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i pojawi się zaczerwienienie, poczekać z nałożeniem kolejnych plastrów.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.