

Plaster Viscoplast Opti-Plast dla delikatnej i wrażliwej skóry, 5 szt.



Nasza cena: 29,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	3M POLAND POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

- Plastry okulistyczne są bardzo delikatne i komfortowe w użyciu.
- Silikonowa, przyjazna skórze dziecka formuła kleju zmniejsza ryzyko podrażnień w porównaniu z tradycyjnym klejem akrylowym.
- Plastry okulistyczne o wymiarach 82 mm x 57 mm mają starannie opracowany kształt, który zapewnia lepsze dopasowanie.
- Plastry okulistyczne dla dzieci są komfortowe i bezbolesne w odklejeniu dzięki silikonowej formule kleju.
- Plastry na oko są bezpieczne dla delikatnej i wrażliwej skóry.
- Są hipoalergiczne.
- Pozwalają skórze oddychać.

Wskazania:

Viscoplast Opti-Plast przeznaczone są do stosowania w terapii okluzyjnej oczu, np. w leczeniu zezów.

Sposób użycia:

- Skórę wokół oka umyć i osuszyć.
- Usunąć papier zabezpieczający plaster.
- Lekko przymknąć oczy uważając, aby nie napinać mięśni. Nie zaciskać oczu.
- Przyłożyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa, i rozpocząć przylepianie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.
- Po umiejscowieniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepną wokół oka.

W przypadku skóry suchej posmarować okolicę oka kremem nawilżającym, szybko wchłaniającym się i dopiero po 30-0 minutach

zastosować plaster.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać ponownie.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.