

# Plaster włókninowy z opatrunkiem soft CEPHAMED 1m\*6cm



Nasza cena: 4,62 zł

## Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

WYRÓB MEDYCZNY NIEJAŁOWY

### Plaster z opatrunkiem włókninowy:

- Miękki - komfortowy dla skóry.
- Elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała.
- Oddychający - przyspiesza gojenie ran.
- Hipoalergiczny - mniejsze ryzyko uczuleń.
- Do cięcia - umożliwia dobór rozmiaru plastra do wielkości rany.
- Nieprzywierający do ran.

### Zastosowanie:

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować na rany silnie sączące.

### Środki ostrożności:

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrobu traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia.

### Sposób użycia:

- Odetnij kawałek plastra.
- Przyklej plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
- W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
- Zmieniaj plaster codziennie.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**