

Plaster włókninowy z opatrunkiem soft CEPHAMED 1m*8cm



Nasza cena: 5,81 zł

Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

WYRÓB MEDYCZNY NIEJAŁOWY

Plaster z opatrunkiem włókninowy:

- Miękki - komfortowy dla skóry.
- Elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała.
- Oddychający - przyspiesza gojenie ran.
- Hipoalergiczny - mniejsze ryzyko uczuleń.
- Do cięcia - umożliwia dobór rozmiaru plastra do wielkości rany.
- Nieprzywierający do ran.

Zastosowanie:

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń.

Przeciwwskazania:

Nie stosować na rany silnie sączące.

Środki ostrożności:

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrobu traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia.

Sposób użycia:

Odetnij kawałek plastra.

Przyklej plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.

W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.

Zmieniaj plaster codziennie.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.