

# Plastry na odciski z kwasem salicylowym (PASOCARE SPECIALIST PLUS), 8 sztuk



Nasza cena: 11,04 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Producent	PASO PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Plastry na odciski z kwasem salicylowym (PASOCARE SPECIALIST PLUS), 8 sztuk

- Ochronne plastry z kwasem salicylowym,
- Przyspieszają proces gojenia odcisków,
- Pierścień otaczający odcisk minimalizuje ból w trakcie chodzenia i chroni przed otarciami,
- Kwas salicylowy dodatkowo zmiękcza odcisk i ułatwia jego usunięcie,
- Plastry przystosowują się do kształtu stopy,
- Odporne na wilgoć,
- W zestawie 8 sztuk plastrów o wymiarach 19 mm x 72 mm.
- z kwasem salicylowym – elastyczne – przyspieszają gojenie

## Zastosowanie

Opatrywanie odcisków na skórze.

## Sposób użycia

- Przed aplikacją plastra namocz odcisk w ciepłej wodzie przez 5 minut. Następnie wysusz skórę i upewnij się, że nie jest tłusta.
- Usuń papier ze strony klejącej plastra.
- Naklej plaster centralnie na odcisk.
- Pozostaw plaster na miejscu do momentu, aż sam zacznie się odklejać. Maksymalny czas aplikacji plastra to 48 godzin.
- Przed usunięciem rozluźnionej skóry, namocz podrażnione miejsce w ciepłej wodzie przez 5 minut.

Jeśli zajdzie taka konieczność, powtarzaj powyższe czynności maksymalnie przez 14 dni.

## Przeciwwskazania

Nie stosuj plastra w przypadku: cukrzycy, problemów z krążeniem lub nadwrażliwości na kwas salicylowy.

U kobiet w ciąży i dzieci stosować wyłącznie za zgodą lekarza.

## Środki ostrożności

Nie stosuj, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone,  
Nie stosuj ponownie zużytego plastra – wyrób jednorazowego użycia.

## Rozmiar

19 x 72 (mm x mm)

## Zawartość opakowania

8 sztuk

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**