

Pre-Seed żel 40g

Nasza cena: 69,95 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	ZEL
Producent	Hexanova Sp.z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Właściwości żelu Pre-Seed:

- Dopochwowy żel nawilżający dla par starających się o dziecko
- Zapewnia optymalne środowisko dla plemników.
- Nie szkodzi plemnikom ani zarodkom.
- Przebadany klinicznie i zalecany przez lekarzy.
- Dostosowuje wartość pH do płodnego śluzu szyjki macicy.
- Rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Rozrodu.

Sposób użycia:

1. Przed pierwszym użyciem usunąć zamknięcie z tubki.
2. Pre-Seed należy zastosować do 15 minut przed stosunkiem płciowym. Zastosowanie żelu przed rozpoczęciem stosunku umożliwia rozproszenie się wilgoci w całej pochwie i umożliwia parze większą spontaniczność.
3. Podłączyć aplikator do tubki Pre-Seed poprzez mocne przykręcenie końcówki aplikatora do tubki .
4. Delikatnie wycisnąć Pre-Seed do aplikatora i kontynuować wyciskanie do chwili, aż aplikator będzie pełny lub znajdzie się w nim pożądana ilość żelu. Większość kobiet wybierze linię napełnienia 3 gm, aby ilość produktu w aplikatorze zaspokoiła ich wymagania. Odłączyć aplikator od tubki. Należy trzymać otwarty koniec aplikatora w pozycji pionowej – ku górze, aby nie doszło do utraty produktu. Po każdym użyciu zakręcić tubkę i zwinąć ją od strony zgrzewu. Nie pozostawiać żelu Pre-Seed bez zamknięcia między zastosowaniami.
5. Nie przechowywać żelu Pre-Seed w aplikatorze przez czas dłuższy niż 30 minut przed użyciem. Oznacza to, że po nabraniu produktu do aplikatora i niewprowadzeniu go do pochwy w ciągu następnych 30 minut, nieużyty produkt Pre-Seed należy wyrzucić wraz z aplikatorem.
6. W celu wprowadzenia żelu Pre-Seed delikatnie wprowadzić aplikator głęboko do pochwy. Można to zrobić w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej (na przykład na toalecie).
7. Trzymając za cylinder aplikatora powoli nacisnąć tłok do oporu w celu wprowadzenia żelu nawilżającego do pochwy .
8. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy.
9. W celu uzyskania właściwego nawilżenia pochwy, po podaniu produktu należy lekko przec. Spowoduje to wydalenie nadmiaru żelu Pre-

Seed z pochwy. W razie potrzeby można usunąć jednorazową chusteczką nadmiar produktu znajdującego się na sromie.
10. Po użyciu wyrzucić aplikator. Nie używać ponownie aplikatorów

Uwagi Pre-Seed nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie ma właściwości plemnikobójczych ani nie zakłóca działania plemników. Pre-Seed jest produktem bardzo śliskim. Należy usunąć wszelkie jego wycieki, niezwłocznie po ich zauważeniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.