

## Protefix Higiena, proszek czyszczący do protez, 80 g



Nasza cena: 10,15 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	80 g
Producent	Queisser Pharma
Rejestracja	Inne

### Opis produktu

#### Opis

Proszek szybko-czyszczący Protefix HIGIENA to skuteczny sposób na czyszczenie protezy.

#### Dawkowanie - Protefix Higiena, proszek czyszczący do protez, 80 g

do szklanki nalać gorącą, ale nie gotującą się wodę. Dodać ok. 1/2 łyżeczki Proszku szybko-czyszczącego i szybko zamieszać. Protezę oczyścić pod bieżącą wodą oraz umieścić w szklance na 3 minuty, tak by pozostawała całkowicie zanurzona. W przypadku wyjątkowo opornych osadów protezę pozostawić w roztworze na 5-10 minut.

Następnie protezę dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą. Proteza jest higienicznie czysta, lśniąca i nadaje się do ponownego założenia.

#### Działania

Samoczynnie czyści i odświeża protezę w 3 minuty. Usuwa oporny osad, przebarwienia i przykry zapach nie uszkadzając wrażliwego materiału protezy.

#### Uwagi

Preparat przeznaczony wyłącznie do czyszczenia protez zębowych, nie stosować w jamie ustnej.