

Protefix Krem mocujący Ekstra Mocny XXL 94g



Nasza cena: 27,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	94 G
Producent	QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Protefix Krem mocujący Ekstra Mocny XXL:

- nanosi się bezpośrednio na wilgotną protezę
- daje się łatwo rozprowadzać na protezie
- siła mocowania utrzymuje się przez 8 do 16 godzin
- ma neutralny smak i daje się łatwo usuwać z protezy
- nie zawiera cynku

Sposób użycia:

Protezę i jamę ustną oczyścić dokładnie z resztek jedzenia. Krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (zgodnie z rysunkiem). W razie potrzeby krem można nałożyć również na tylną część protezy szczęki górnej. Przy nakładaniu kremu tubę naciskać w części bliżej ujścia tubki.

Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej jego ilości maleje skuteczność działania mocującego. Dodatkowo zbyt grubą warstwę kremu trudniej jest usuwać z protezy lub z podniebienia.

Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut. Resztki kremu mocującego można łatwo usunąć przy pomocy wacika zwilżonego olejem jadalnym.

Ważne:

Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę, przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Krem przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 o C), w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.