

## Protefix, podściółka mocująca do protez zębowych, 30 szt.



Nasza cena: 20,71 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Producent	QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

Podściółki mocujące Protefix to krążki delikatnej i cienkiej ligniny nasączonej alginatem sodu o właściwościach adhezyjnych (mocujących). Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy.

Pozwalają na redukcję ucisku nowej protezy. Stosowanie podściółek mocujących jest również wskazane w przypadku:

-szczególnie trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta, na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku.

-konieczności stosowania leków przeciwgrzybiczych (podściółki pozwalają na nasączenie ich preparatem przeciwgrzybiczym).

O stosowaniu podściółki powinien zdecydować lekarz.

#### Dawkowanie - Protefix, podściółka mocująca do protez zębowych, 30 szt.

Podściółkę mocującą przyciąć do wielkości protezy, zanurzyć na ok. 10 sek. w letniej wodzie, nałożyć na oczyszczoną, wilgotną protezę i przycisnąć.

#### Składniki - Protefix, podściółka mocująca do protez zębowych, 30 szt.

100 g podściółki zawiera alginian sodowy 28 g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72 g.

#### Przeciwwskazania - Protefix, podściółka mocująca do protez zębowych, 30 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników podściółki..

## Przeciwwskazania - Protefix, podściółka mocująca do protez zębowych, 30 szt.

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu.

### Uwagi

przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać (po dokładnym oczyszczeniu protezy) po każdym posiłku, ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**