

Protefix Premium Mocowanie, krem 47 g



Nasza cena: 19,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	47 g
Producent	QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Protefix Premium Mocowanie, krem 47 g

Protefix Premium Krem mocujący wskazany jest do stosowania tym osobom, które chcą zadbać o skuteczne założenie protezy zębowej.

Właściwości

Protefix Premium Krem mocujący zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień, skutecznie uszczelnia protezę zębową przed przedostaniem się drobinek jedzenia. Można nanosić go na mokrą protezę zębową dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową. Witamina E pielęgnuje dziąsła. W składzie kremu znalazła się formuła z mirrą, szałwią i rumiankiem. Wyrób pozostawia również długotrwałe uczucie świeżości w ustach.

Skład

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru, PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, wyciąg z rumianku pospolitego, octan tokoferylu, mirra, wyciąg z szałwii lekarskiej, mleczan mentylu, wyciągu z mięty, CI 14720.

Stosowanie

Dawka dobowo: do 0,8 g kremu mocującego. Należy wyczyścić protezę zębową i błonę śluzową jamy ustnej z resztek pokarmu. Krem mocujący Protefix® PREMIUM MOCOWANIE nałożyć na oczyszczoną, mokrą lub suchą protezę zębową w odstępach (krótkimi odcinkami) jak na instrukcji (do zagłębienia w protezie szczęki lub żuchwy, którym proteza zębową będzie przylegać do szczęki lub żuchwy). W razie potrzeby można nanieść pasek kremu mocującego Protefix® PREMIUM MOCOWANIE na tylną część płytki podniebiennej protezy szczęki. Następnie założyć protezę zębową, docisnąć ją przez kilka sekund do szczęki lub żuchwy i lekko przygryźć. Odczekać 5 minut przed przyjmowaniem posiłku.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.