

Protefix Tabletki czyszczące x 66



Nasza cena: 30,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*66
Producent	QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Tabletki czyszczące **Protefix** nie tylko dokładnie i szybko usuwają odporne osady z protezy czy aparatu ortodontycznego, ale również je dezynfekują i likwidują przykry zapach. Zaleca się dokładną dezynfekcję protezy przy pomocy tabletek czyszczących przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Dzięki temu można chronić jamę ustną przed szkodliwymi bakteriami, będącymi źródłem stanów zapalnych i przykrego zapachu.

Działanie tabletek oparte jest na zawartości związków uwalniających wolny tlen cząsteczkowy (aktywny tlen), który dezynfekuje protezę i usuwa ewentualne przebarwienia. Zawartość detergentów ułatwia ostateczne oczyszczenie protezy.

Sposób użycia:

Włożyć 1 tabletkę czyszczącą do pół szklanki letniej wody. Następnie do roztworu włożyć protezę na około 15 minut. Proteza powinna być całkowicie zanurzona. Po ok. 15 minutach wyjąć protezę i wypłukać ją dokładnie pod bieżącą wodą. Ze względów higienicznych nie jest zalecane pozostawianie protezy w wodzie na noc.

Tabletki po rozpuszczeniu w wodzie przyjmują barwę ciemno-granatową. Po czyszczeniu kolor roztworu zmienia się na jasno-niebieski. Po tym można poznać, że proces czyszczenia został zakończony.

Uwaga:

Tabletek nie wkładać do ust ani nie płukać ust ich roztworem!

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

