

Remo-Wax Krople do usuwania woskowiny usznej, 10ml + Gumowa Gruszka



Nasza cena: 21,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10ml
Producent	ORION CORPORATION FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Remo-Wax Krople do usuwania woskowiny usznej, 10ml + Gumowa Gruszka

Czyszczenie zewnętrznego przewodu słuchowego najskuteczniej i najdelikatniej wykonuje się za pomocą preparatu do usuwania woskowiny **Remo-Wax krople**, zawierającego wysoko oczyszczoną pochodną lanoliny oraz inne zmiękczające składniki w roztworze wodnym.

W temperaturze równej temperaturze ciała, **Remo-Wax** wnika w woskowinę w przewodzie słuchowym i zmiękcza ją, tym samym ułatwiając wymycie nadmiernej ilości woskowiny do ucha zewnętrznego przy pomocy pompki usznej z letnią wodą. Nie wolno stosować preparatu **Remo-Wax** w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej, zapalenia oraz w stanach związanych z bólem. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

Remo-Wax Krople szczególnie wskazany jest dla:

- osób starszych, skarżących się na niedosłyszenie
- osób z aparatem słuchowym
- osób często korzystających ze słuchawek
- osób uprawiających pływanie
- każdego dbającego w prawidłowy sposób o drożność przewodu słuchowego zewnętrznego

Sposób użycia:

-zaaplikować 10-20 kropli preparatu **Remo-Wax** do ucha, następnie włożyć do ucha kawałek nienasiąkliwego wacika.

- należy przechylić głowę na bok, aby zapobiec wypłynięciu preparatu i pozostać w takiej pozycji przez około 20-50 minut.
- następnie wypłukać delikatnie ucho letnią wodą (37°C) za pomocą pompki usznej.
- jeżeli czop woskowinowy nie ulegnie rozpuszczeniu po zastosowaniu takiego zabiegu, należy zaaplikować 20 kropli preparatu **Remo-Wax** do ucha przed położeniem się do łóżka.
- włożyć do ucha nienasiąkliwy wacik, aby pozwolić preparatowi **Remo-Wax** działać przez noc.
- następnego dnia należy przepłukać ucho letnią wodą za pomocą pompki usznej.
- u dzieci do lat dwóch stosować po konsultacji z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.