

Scholl zestaw na wrastające paznokcie



Nasza cena: 83,43 zł

Opis słownikowy

Producent	Reckitt Benckiser Healthcare
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

Nowy Scholl zestaw na wrastające paznokcie pomoże w łatwy 2 etapowy sposób walczyć z problemem wrastającego paznokcia.

Krok 1: chłodzący spray w aerozolu

Spray chłodzi i uśmierza ból.

Oto instrukcja użycia w punktach:

- Porządnie wstrząśnij pojemnikiem
- Rozpyl z odległości 10 cm na obszar paznokcia i otaczającej go skóry palca
- Pozwól, aby spray wysychł przez ok. 1 minutę
- Spray można używać do 5 razy dziennie
- Pomiedzy użyciami należy zrobić co najmniej godzinną przerwę

Spray należy nakładać pojedynczym naciśnięciem tłoczka.

Krok 2: Klamra na paznokcie

Klamra podnosi krawędź paznokcia powstrzymując jego wrastanie w skórę, pozwala też, aby paznokieć rósł dalej pod właściwym kątem.

- Nałóż cienką warstwę kleju – jest on częścią zestawu, na górną powierzchnię paznokcia
- Żeby nałożyć kłamrę paznokieć powinien wyrastać na minimum 2 mm ponad palec
- Umieść kłamrę na krawędzi paznokcia, upewniając się, że brzegi kłamry są zakleszczone po obu stronach paznokcia.

Zalecenie:

Najpierw włóż jeden zaczep klamry pod paznokieć z jednej strony, a następnie z drugiej)

Dociśnij delikatnie górną część klamry do paznokcia. Trzymaj aż do wyschnięcia kleju. Uważaj, aby nie dotknąć kleju.

Zaleca się wymieniać klamrę raz na tydzień.