

SEA-BAND opaska przeciw mdłościom dla dzieci (kolor różowy), 2 sztuki (1 para)



Nasza cena: 34,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*2
Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

SEA-BAND opaska przeciw mdłościom dla dzieci (kolor różowy), 2 sztuki (1 para)

Zastosowanie

Redukcja objawów choroby lokomocyjnej u dzieci powyżej 3 roku życia.

Sposób działania

Opaski Sea-Band to wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia. Opaski hamują objawy choroby lokomocyjnej (mdłości, wymioty) i zostały przetestowane klinicznie. Ich działanie opiera się na akupresurze -chińskiej medycynie naturalnej. Opaski przeciw mdłościom są skonstruowane w ten sposób, by uciskać punkt P6 (Nei-Kuan) zlokalizowany pomiędzy dwoma głównymi ścięgnami w okolicach nadgarstka. W ten sposób zatrzymują objawy choroby lokomocyjnej.

Już po kilku minutach od założenia opasek może być odczuwalne ich działanie. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się, by zakładać je przed podróżą samochodem, samolotem lub statkiem. Mogą być również zakładane w trakcie podróży lub noszone stale. Hamują mdłości, będące skutkiem chemioterapii lub znieczulenia ogólnego.

Opaski przeciw wymiotom nie powodują senności i innych skutków ubocznych. Wykonane z nylonowego włókna z dodatkiem elastyny są wielokrotnego użytku i mogą być prane przy pomocy łagodnego detergentu.

Właściwości

- Hamuje objawy choroby lokomocyjnej.
- Dla dzieci powyżej 3 lat.

- Działanie na zasadzie akupresury.
- Produkt wielokrotnego użytku.
- Możliwość prania.
- Komfort stosowania.
- Nie powoduje efektów ubocznych.
- Szybkie działanie.
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Jak założyć opaskę Sea-Band dla dzieci?

- Umieść trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej linii nadgarstka.
- Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami nadgarstka.
- Załóż opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan.
- Powtórz czynność na drugim nadgarstku.

Opaski SeaBand można założyć przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.

Informacje dodatkowe

Skład włókna: nylon, elastan.
Rozmiar: dziecięcy.

Opaski można prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego delikatnego detergentu.

Wyrób medyczny przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Ostrzeżenie

W przypadku pojawienia się opuchlizny należy niezwłocznie zdjąć opaski.

Zawartość opakowania

2 x opaska akupresurowa przeciw mdłościom (1 para)

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Sea-Band Limited
Hawley Road, Hinckley
Leicestershire LE10 0PR

Dystrybutor

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.