

## Sikatriss plaster na blizny 10cm x 10cm, 5 sztuk



Nasza cena: 57,88 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	Biovena Health Sp. Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

#### Wielkość plastra 10cm x 10cm dostosowana do:

- blizn pourazowych (stłuczenia, obtarcia)
- blizn po oparzeniach
- do indywidualnego dopasowania do wielkości blizny

#### Wskazania:

SIKATRIS to plastry silikonowe na blizny przeznaczone do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn, charakteryzujące się łatwością i wygodą stosowania.

SIKATRIS poprawia wygląd blizn zarówno starych jak i świeżych. Skuteczny na blizny przerostowe (hipertroficzne) i keloidowe (bliznowce), jak również jako środek profilaktyczny na zamknięte rany, zapobiegający nieprawidłowemu bliznowaceniu.

#### Plastry SIKATRIS:

- Zmniejszają widoczność blizny
- Rozjaśniają i wygładzają bliznę
- Wspomagają rehabilitację blizn pourazowych, pooparzeniowych itp.
- Ultra cienkie, wygodne w stosowaniu

#### Sposób użycia:

- Przed użyciem dokładnie umyć ręce

- Delikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę
- Wyjąć plaster z opakowania
- W razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny)
- Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny
- Dokleić do całej powierzchni blizny
- Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć
- Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**