

Sikatriss plaster na blizny 5cm x 30cm, 1 sztuka

Nasza cena: 26,14 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	Biovena Health Sp. Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Wielkość plastra 5cm x 30cm dostosowana do:

- blizn po cesarskim cięciu
- blizn po operacjach kardiologicznych
- blizn po operacji usunięcia nerki
- blizn po abdominoplastyce
- blizn po oparzeniach i innych

Wskazania:

SIKATRIS to plastry silikonowe na blizny przeznaczone do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn, charakteryzujące się łatwością i wygodą stosowania.

SIKATRIS poprawia wygląd blizn zarówno starych jak i świeżych. Skuteczny na blizny przerostowe (hipertroficzne) i keloidowe (bliznowce), jak również jako środek profilaktyczny na zamknięte rany, zapobiegający nieprawidłowemu bliznowaceniu.

Plastry SIKATRIS:

- Zmniejszają widoczność blizny
- Rozjaśniają i wygładzają bliznę
- Wspomagają rehabilitację blizn pourazowych, pooparzeniowych itp.
- Ultracienkie, wygodne w stosowaniu

Sposób użycia:

- Przed użyciem dokładnie umyć ręce
- Delikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę
- Wyjąć plaster z opakowania
- W razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny)
- Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny
- Dokleić do całej powierzchni blizny
- Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć

- Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.