

Softeye Duo, krople do oczu, 10 ml



Nasza cena: 29,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Softeye Duo to wyrób medyczny w postaci kropli do oczu o działaniu nawilżającym, łagodzącym, ochronnym i ułatwiającym regenerację powierzchni oka.

Nie zawiera konserwantów.

Krople mogą być stosowane na soczewki kontaktowe.

SKŁAD

Chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, woda oczyszczona.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie 10 ml.

DZIAŁANIE

Działanie wyrobu związane jest z obecnością w jego składzie dwóch substancji: hialuronianu sodu (który działa nawilżająco i stabilizująco na film łzowy) oraz dekspantenolu (o działaniu łagodzącym, ochronnym i ułatwiającym regenerację powierzchni narządu wzroku).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania w celu zmniejszenia nasilenia objawów w łagodnej do umiarkowanej postaci zespołu suchego oka i/lub podrażnienia jego powierzchni.

WSKAZANIA

Krople do oczu Softeye Duo zalecane są w przypadku:

- mechanicznych podrażnień (pieczenie, swędzenie, łzawienie), które wynikają z czynników zewnętrznych (takich jak wiatr, słońce,

chlorowana woda, stosowana farmakoterapia);

- mechanicznych podrażnień powierzchni oka (pieczenie, swędzenie, łzawienie), które spowodowane są noszeniem soczewek kontaktowych, interwencjami diagnostycznymi lub chirurgicznymi na oku;
- uczucia zmęczenia oczu, które może być wynikiem zbyt długotrwałej pracy przy komputerze lub zbyt długim przebywaniem przed ekranem telewizora.

Wyrób pomaga łagodzić objawy związane z suchością narządu wzroku wywołane:

- zaburzeniami filmu łzowego, które są spowodowane brakiem łez lub ich nadmiernym odparowaniem,
- przez środowisko (centralne ogrzewanie, klimatyzowane pomieszczenia, dym, wiatr),
- długą pracą przy komputerze,
- noszeniem soczewek,
- stosowaniem kropli do oczu zmniejszających przekrwienie,
- procesem starzenia organizmu,
- płcią (np. zmianami hormonalnymi u kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji, menopauzy),
- stosowanymi lekami (np. przeciwdepresyjnymi, antykoncepcją doustną),
- interwencją chirurgiczną, urazami, obecnością ciała obcego w oku,
- chorobą (reumatoidalnym zapaleniem stawów, cukrzycą, astmą, problemami z tarczycą).

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Usunąć korek z pompki.

Chwycić pompkę dłońią.

Obrócić butelkę do góry nogami i naciskać pompkę do pojawienia się pierwszej kropli.

Przytrzymać opakowanie do góry dnem i, naciskając pompkę, zakropić zalecaną ilość kropli do oka.

STOSOWANIE PRODUKTU

Stosować 1-2 krople do oczu, kilka razy na dobę, za każdym razem kilkakrotnie mrugając, aby rozprowadzić roztwór równomiernie na powierzchni oka.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Termin ważności po otwarciu wynosi: 180 dni.

STOSOWANIE WYROBU Z INNYMI LEKAMI

Nie są znane interakcje produktu Softeye Duo z płynami do soczewek, innymi kroplami do oczu ani miejscowymi maściami do oczu. W przypadku zastosowania innego produktu do oczu, należy odczekać 15 minut pomiędzy aplikacjami.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

