

Spray na afty Cephamed, 30ml

Nasza cena: 15,25 zł



Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Opakowanie	30 ml
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Pomoc w łagodzeniu dolegliwości bólowych jamy ust

- Wyrób zawiera nanocząsteczki złota, srebra, miedzi.
- Wygodny aplikator umożliwia aseptyczną aplikację wyrobu bezpośrednio w miejsce bólu.
- Może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:
 - stany aftowego zapalenia jamy ustnej;
 - owrzodzenia aftowe;
 - zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego;
 - niewłaściwe dopasowanie protez.

SKŁADNIKI

Olej z pestek winogron, srebro nanokolidalne, miedź nanokolidalna, złoto nanokolidalne, olejek mięty pieprzowej, sorbinian potasu, benzoesan sodu, glicerol, polisorbata 20, woda oczyszczona.

Przed pierwszym użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką, następnie kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Należy skierować aplikator na zmianę w jamie ustnej i naciskając rozpylić 3 razy lub tyle ile jest potrzebne, aby pokryć zmianę. Zleca się stosować 3 do 4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby. Dla lepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez godzinę po zastosowaniu.

MASA NETTO

30 ml (opakowanie zawiera ok. 300 dawek).

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne. W przypadku ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

OSTRZEŻENIA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

PRODUCENT

GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A
26-130 Suchedniów

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.