

Sutricon silikonowe plastry na blizny 5 x 30, 5 sztuk



Nasza cena: 119,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	M-Technologies Francja [Fr]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Sutricon silikonowe plastry na blizny to innowacyjne plastry, przeznaczone do stosowania podczas leczenia wszystkich rodzajów blizn. Posiadają wyjątkową strukturę, dzięki której są niezwykle wygodne w stosowaniu. Ich skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych.

Wskazania w stosowaniu:

- blizny pooperacyjne
- blizny po cesarskim cięciu
- blizny poparzeniowe
- blizny pourazowe
- w celu zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych
- w zapobieganiu nieproawidłowego bliznowaceniu

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych jak i dzieci.

Działanie plastrów Sutricon:

Silikonowe plastry Sutricon bardzo skutecznie poprawiają wygląd estetyczny blizn ww genezy. Ich innowacyjna struktura, której głównym składnikiem jest żel silikonowy redukuje dyskomfort w postaci bólu, swędzenia skóry oraz łagodzi uczucie ściągnięcia skóry.

Skład plastrów:

Żel silikonowy 200g/mkw, elastyczna siatka poliuretanowa o grubości zaledwie 50µm

Sposób stosowania:

Silikonowe plastry Sutricon można stosować od razu po zdjęciu szwów lub po zamknięciu rany. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.

Plaster należy zmieniać średnio co 3- 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się, wymieniając plaster co 24 godziny.

Opakowanie:

5 silikonowych plastrów żelowych o rozmiarze 5 cm x 30 cm do indywidualnego dopasowania (przycięcia) do powierzchni blizny.

W zależności od wielkości blizny, jedno opakowanie starcza na około miesiąc kuracji, w przypadku dużej blizny, np. po cięciu cesarskim, a w przypadku mniejszych blizn na znacznie dłuższy okres.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.