

Sutricon żel na blizny silikonowy 15ml

Nasza cena: 30,79 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Sutricon żel pomaga poprawić wygląd zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn[1]. Żel pozostawia efekt matowego wykończenia, co jest szczególnie ważne w okolicach twarzy. Skóra staje się jedwabście gładka w dotyku już od momentu aplikacji. Po szybkim wyschnięciu żel tworzy na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroni bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Regularne stosowanie żelu silikonowego pomaga poprawić wygląd zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn.

Wskazania:

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji:

- blizn pooperacyjnych
- blizn poparzeniowych
- blizn pourazowych
- blizn przerostowych i keloidów (bliznowców)
- blizn potrądzikowych
- rozstępów

Działanie silikonu:

Regularne stosowanie żelu silikonowego na powierzchnię blizny wspomaga jej zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie. Dodatkowo pomaga w pielęgnacji blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych. Najlepsze efekty pielęgnacji uzyskuje się poprzez aplikację żelu Sutricon połączoną z masażem blizny.

Zalety produktu:

- Wygodny w stosowaniu na blizny na odkrytych częściach ciała i przy małych bliznach pozabiegowych
- Zawiera wysokiej jakości silikon farmaceutyczny
- Nie pozostawia tłustego filmu - formuła non-oily
- Skóra staje się matowa i jedwabście gładka w dotyku (efekt silky)
- Przezroczysty, bezwonny, hipoalergiczny
- Dzięki matowej formule jest idealny pod makijaż

Czas stosowania:

Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją użycia. Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m. in. wielkości i rodzaju blizny, wieku czy uwarunkowań genetycznych. Zadowalające efekty uzyskiwane są po:

ok. 1-2 miesiącach (blizny świeże, po ranach ciętych)
od 1 roku do 5 lat (blizny dojrzałe: od 1 roku do 9 lat)

Składniki:

- Cyclopentasiloxane
- Dimethicone
- Dimethicone Crosspolymer
- Silica

Sposób użycia:

Stosowanie produktu Sutricon żel powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie preparatu minimum dwa razy dziennie.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.