

SutriSept Hydrożel 30 ml



Nasza cena: 35,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

SutriSept Hydrożel, 30 ml

SutriSept Hydrożel na rany służy do oczyszczania, irygacji i nawilżania różnego rodzaju ran. Może być stosowany również do dezynfekcji materiałów medycznych takich jak opatrunki czy bandaże. Zawiera dobrze tolerowaną substancję PHMB (poliheksanid) i może być alternatywą dla stosowanych dotychczas środków na rany.

SutriSept Hydrożel na rany wypełnia powierzchnię między raną a opatrunkiem, dzięki czemu izoluje ją od środowiska zewnętrznego, zapobiega przyleganiu mikroorganizmów i pomaga utrzymać czystość w ranie. Dodatkowo przyczynia się do ich gojenia.

SutriSept Hydrożel na rany może być stosowany przez dłuższy czas.

Wskazania

- Oczyszczanie ran i skóry
- Irygacja ran
- Nawilżanie ran
- Dezynfekcja materiałów medycznych (opatrunki, bandaże, gaza etc.)
- Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego
- Zapobieganie przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany
- Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku

SutriSept Hydrożel na rany dobrze sprawdzi się na rany głębokie lub wielkopowierzchniowe, które wymagają wypełnienia.

Oczyszczanie i zapobieganie zakażeniu:

- Ran pooperacyjnych
- Ran pourazowych (przecięcie, otarcie, ugryzienie, użądlenie)
- Ran przewlekłych i zakażonych
- Oparzeń 1. i 2. stopnia
- Oparzeń chemicznych
- Miejsc wprowadzenia cewników urologicznych
- Skóry w okolicy stomii, przetok i ropni

Zalety produktu:

- alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji na rany,
- sprzyjanie procesowi gojenia rany,
- możliwość bezbolesnego oczyszczania ran
- skuteczne usuwanie zabrudzeń, pozostałości wysięku, wyschniętych tkanek, strupów z powierzchni rany,
- umożliwienie oceny wyglądu rany w trakcie procesu gojenia (przezroczysty, bezbarwny, bezzapachowy żel).

Sposób użycia

W przypadku ran głębszych i na większych powierzchniach najpierw należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie wypełnić produktem SutriSept Hydrożel na rany.

- Przed założeniem opatrunku i bandaża należy pokryć dno rany dużą ilością hydrożelu. SutriSept Hydrożel na rany może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. W ten sposób SutriSept Hydrożel na rany stale utrzymuje wilgotność powierzchni rany i minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany.

- Ochronną powłokę pokrywającą powierzchnię rany, utworzoną przez hydrożel można łatwo usunąć podczas kolejnej zmiany opatrunku. W tym celu podczas zmiany opatrunku zaleca się stosowanie produktu SutriSept Płyn na rany.

- Aplikację należy regularnie powtarzać w okresie gojenia rany w celu usunięcia obumarłych tkanek i strupów.

- Nie należy przekraczać 30-dniowego okresu nieprzerwanego stosowania hydrożelu na tę samą ranę.

- W celu uniknięcia zanieczyszczenia należy zamykać tubkę natychmiast po użyciu produktu.

- Otwieraną tubkę należy odpowiednio chronić, aby uniknąć zanieczyszczenia zawartości podczas używania. Tubki, które weszły w bezpośredni kontakt z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób, należy wyrzucić do odpadów.

- Otwarty produkt należy stosować tylko u jednego pacjenta, w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.