

SutriSept płyn 250ml

Nasza cena: 45,10 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	PLYN
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

SutriSept Płyn na rany służy do oczyszczania, irygacji i nawilżania różnego rodzaju ran. Może być stosowany również do dezynfekcji materiałów medycznych takich jak opatrunki czy bandaże. Zawiera dobrze tolerowaną substancję PHMB (poliheksanid) i może być alternatywą dla stosowanych dotychczas środków na rany.

SutriSept Płyn na rany pozwala na wygodne i bezbolesne oczyszczanie ran. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości płynu zapobiegają tworzeniu się biofilmu bakteryjnego, co stwarza dobre warunki do gojenia rany. Wygodny atomizer umożliwia precyzyjną aplikację płynu na ranę.

SutriSept Płyn na rany może być stosowany przez dłuższy czas.

Wskazania:

- Oczyszczanie ran i skóry
- Irygacja ran
- Nawilżanie ran
- Dezynfekcja materiałów medycznych (opatrunki, bandaże, gaza etc.)
- Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego
- Zapobieganie tworzeniu się biofilmu bakteryjnego
- Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku

Oczyszczanie i zapobieganie zakażeniu:

- Ran pooperacyjnych
- Ran po cesarskim cięciu
- Ran przewlekłych i zakażonych
- Oparzeń 1. i 2. Stopnia
- Otarć

Zalety produktu:

- alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji na rany,
- sprzyjanie procesowi gojenia rany,
- możliwość bezbolesnego oczyszczania ran,
- skuteczne usuwanie zabrudzeń, pozostałości wysięku, wyschniętych tkanek, strupów z powierzchni rany,
- produkt gotowy do użycia,
- precyzyjna aplikacja na ranę dzięki atomizerowi,
- przezroczysty, bezbarwny, bezzapachowy płyn.

Sposób użycia:

W przypadku ran głębszych i na większych powierzchniach najpierw należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie wypełnić produktem SutriSept Hydrożel na rany.

W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na rany.

- Całą ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić. Zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie zmoczonego kompresu.
- Płynu nie należy rozcieńczać.
- Oczyszczoną ranę należy pokryć produktem SutriSept Płyn na rany.
- Oczyszczoną ranę należy zabezpieczyć bandażem, opatrunkiem lub plastrem.
- Zadrapań

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.