

SutriSept Płyn na rany, 1000 ml



Nasza cena: 87,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1000 ml
Producent	Verco Sp. Z O.o.
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

SutriSept Płyn na rany, 1000 ml

SutriSept® w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran¹.

Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu

SutriSept płyn na rany rekomendowany jest jako pierwszy wybór w

- Odkażaniu ran
- Oparzeniach
- Ranach zainfekowanych
- Ranach z biofilmem

Wskazania

SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne),
- Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.),
- Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.),
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego,

- Rany popromienne,
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych,
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

SutriSept Płyn na rany odpowiedni jest również:

- Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

Właściwości

- Pierwszy wybór na rany i oparzenia
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie
- Bezboleśnie oczyszcza i nawilża ranę
- Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania
- Wygodny w użyciu atomizer rozpylający

Sposób użycia

Przed założeniem opatrunku:

Krok 1

Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.

Krok 2

Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez założenie mokrego opatrunku).

Krok 3

Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych.

Krok 4

Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczoną ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept® w Gel Hydrożel na rany.

Krok 5

Odpowiednio zabandażować ranę.

Po założeniu opatrunku:

Krok 1

Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany.

Krok 2

Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.

Krok 3

SutriSept® w Solution Płyn na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany.

Skład

Jedyne połączenie takich substancji jak:

0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%

PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania

Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran