

Tantum Rosa Irygator do higieny intymnej, 500 ml



Nasza cena: 23,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	500ml
Producent	Angelini Pharma Polska [Pl]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Tantum Rosa Irygator do higieny intymnej, 500 ml

Irygator Tantum Rosa to wygodny pojemnik z aplikatorem do płukania pochwy i higieny intymnej o pojemności 500 ml, do wielorazowego użytku.

Irygator do higieny intymnej Tantum Rosa służy do wykonywania płukania pochwy. To pojemnik wielokrotnego użytku, pomocny w miejscowym stosowaniu roztworów dopochwowych.

Regularna higiena pochwy pomaga w zachowaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej pochwy i może odpowiednio uzupełniać zalecane przez lekarza leczenie stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych, wywołanych przez infekcje intymne, podrażnienie mechaniczne lub w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii.

Co zawiera opakowanie irygatora do higieny intymnej Tantum Rosa

Zawartość opakowania: 1 plastikowy zbiornik z korkiem oraz aplikator. Irygator ma pojemność 500 ml.

Jak stosować irygator Tantum Rosa?

- Irygator Tantum Rosa jest bezpieczny, wykonany z elastycznego i gładkiego plastiku.
- Irygator może być użyty wielokrotnie.
- Irygator przeznaczony jest do używania przez jedną kobietę.

- Irygator dopochwowy jest przeznaczony do użytku indywidualnego.

Jak używać irygator do płukania pochwy?

1. Płyn do irygacji należy przygotować używając wody o temperaturze ciała.
2. Należy napełnić zbiornik przygotowanym roztworem w ilości 500 ml.
3. Na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora (aplikator).
4. Ostrożnie wprowadzić końcówkę irygatora (aplikator) do pochwy, najgłębiej jak jest to możliwe.
5. Zbiornik należy trzymać dwoma rękoma, kciuki należy ułożyć na korku przy końcówce irygatora (aplikatorze).
6. Naciskając zbiornik doprowadzić do jego opróżnienia.
7. Jeżeli jest to możliwe irygację należy wykonać w pozycji leżącej, najlepiej w pustej wannie, lub stojącej – np. pod prysznicem. Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie irygacji w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej. Można również wykonać irygację w pozycji siedzącej – na bidecie lub sedesie.
8. Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora (aplikator) z pochwy nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do zbiornika wydzieliny z pochwy.
9. Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora (aplikator).
10. Obie części umyć w ciepłej (do 40°C) wodzie i odstawić do osuszenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Uwaga – żadnej części irygatora nie należy myć w zmywarce.
- Nie sterylizować.
- Nie podgrzewać powyżej 40°C.
- Nie stosować żrących środków do dezynfekcji.
- Nie stosować roztworów środków drażniących oraz środków powierzchniowo czynnych (detergentów).

Kobiety, które nie rozpoczęły życia seksualnego nie powinny stosować irygatora, gdyż jego użycie może spowodować przerwanie błony dziewiczej.

Dystrybutor w Polsce

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
tel. (22) 70 28 200 | email: angelini@angelini.pl

Producent

Pentaferte Italia S.r.l.
Viale Piane Nocella 23,
64012 Campli (TE), Włochy

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.